



aspirmatic®

fogászati kezelőegységek és amalgám szeparátorok napi tisztítására, fertőtlenítésére és szagtalanítására

aspirmatic® cleaner

fogászati szívókészülékek, szájöblítő medencék és lefolyóvezetékek speciális tisztítására

Amit nyújt

- hatékonyságát széleskörű gyakorlati tesztek igazolják
- bármilyen típusú integrált amalgám-leválasztó berendezéshez (pl. Dürr, Metasys) és fogászati kezelőegységhez (pl. Sirona, KaVo, Castellini, stb.) használható
- habzásmentes
- friss illatú
- aldehidmentes
- egyszerű, gazdaságos és biztonságos használat

Alkalmazási terület

- **aspirmatic®**: fogászati kezelőegységek és amalgám szeparátorok napi tisztítása, fertőtlenítése és szagtalanítása
- **aspirmatic cleaner®**: fogászati szívókészülékek, szájöblítő medencék és lefolyóvezetékek heti speciális tisztításának a segítése
- Mindkét termék használata után alapos öblítés szükséges.

Mikrobiológiai hatásspektrum, koncentrációk és behatási idők

aspirmatic®	
baktericid* yeasticid* virucid burkos vírusok ellen**	2% - 30perc
aspirmatic® cleaner	
Nagyfokú szennyezettség vagy hosszabb állásidő után	5% - kb. 1-2 óra 10% - kb. 1-2- óra
<i>*VAH tanúsítvány ** DVV/RKI irányelv szerint</i>	

Alkalmazás módja

Az **aspirmatic®** és az **aspirmatic® cleaner** koncentrátum formájában kerül forgalomba, és mindkét szer vízzel hígítandó. Használja az **aspirmatic®** oldatot a napközbeni, és kezelés végén az esti tisztító-fertőtlenítésre! Az adagolást megkönnyíti az **aspirmatic® system**, a keverő kancsó és a flakonra rácsavarható, újrafelhasználható adagoló (adagonként 20 ml). 2 liter oldat elkészítéséhez az **aspirmatic®** kancsóban keverjen össze 1960 ml vizet és 40 ml koncentrátumot! A kész munkaidőből 1500 ml-t szívjon fel, a maradék 500 ml-t öntse a szájöblítő medencébe. Behatási idő 30 perc. Kezelés után min. 1 liter vízzel történő öblítés szükséges

Használja az **aspirmatic® cleaner**-t hetente 1-2 alkalommal a napközbeni fertőtlenítés helyett!
2 liter oldat elkészítéséhez az **aspirmatic®** kancsóban keverjen össze 1900 ml vizet és 100 ml koncentrátumot! Kb. 1500 ml oldatot szívjon át a szívócsöveken, a maradék 500 ml-t öntse a szájöblítő medencébe.
Behatási idő 1, maximum 2 óra.
Kezelés után öblítés szükséges! Ne hagyja a munkaidőt a rendszerben hétvégére vagy éjszakára!
Erős vérszennyeződés esetén azonnal öblítse át a rendszert vízzel!

aspirmatic® / aspirmatic® cleaner

Termékadatok

Összetétel:

aspirmatic® 100 g koncentrátum hatóanyagtartalma:

7,5 g dioktil-dimetil-ammoniumklorid,

Címkézés EU 648/2004 rendelet szerint: <5% nem-ionos tenzidek, <5% szappan, illatanyag

aspirmatic® cleaner:

Címkézés EU 648/2004 rendelet szerint: 5% nem-ionos tenzidek

Kémiai / fizikai adatok

aspirmatic®

szín	kék
sűrűség	ca. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
lobbanáspont	nem alkalmazható
megjelenés	folyadék
pH érték	6,5 – 7,5 / 20 °C
viszkozitás, dinamika	nincs elérhető adat

aspirmatic® cleaner

szín	sárga
sűrűség	ca. 1,17 g/cm ³ / 20 °C
lobbanáspont	>100 °C / módszer: ISO 2719
megjelenés	folyadék
pH érték	ca. 0,9 / 20 °C / koncentrátum
viszkozitás, dinamika	nincs elérhető adat

Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egység	Cikkszám
aspirmatic® 2 literes	5 x 2 l	150113
aspirmatic® cleaner 2 literes	5 x 2 l	150313

Adagoló segédeszközök/ tartozékok

Kiszerezési egységek	Cikkszám
aspirmatic® system (kancsó)	183701

aspirmatic®  0279

aspirmatic® cleaner 

Figyelmeztetés

Mindig olvassa el a termék címkéjét és a terméktájékoztatót használatot megelőzően!

Az Európai Unió egészségügyi és munkavédelmi előírásainak megfelelően védőkesztyű használata minden esetben kötelező, olyan fertőtlenítőszer használata esetén, amelyek nem kézfertőtlenítésre szolgálnak.

Soha ne használja a szert a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után!

Ne keverje az aspirmatic® és az aspirmatic® cleaner koncentrátumokat vagy munkaoldatokat!

Környezetvédelmi információk

Schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően állítja elő.

További információ

Kérjük, látogassa meg weboldalunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

Allegro Kft

1045 Budapest, Berliini utca 47-49.

www.allegro.hu

Vevőszolgálat:

tel: +36 1 350 2207

e-mail: info@allegro.hu

