



dentavon<sup>®</sup> aktív oxigén alapú aldehydmentes fertőtlenítőszer fogászati lenyomatok fertőtlenítésére

## dentavon<sup>®</sup>

### Amit nyújt

- baktericid, levurocid és virucid hatásspektrum

### Alkalmazási terület

Szilikonból és poliéterből készült fogászati lenyomatok fertőtlenítése.

### Használati utasítás

A munkaoldat 1 munkanapig megtartja a stabilitását, mialatt garantált a teljes mikrobiológiai hatékonyság. Kizárólag a munkaoldat túlzott elszennyeződése esetén válik szükségessé a cseréje rövidebb időn belül. Higiéniai okokból és a baktérium- és egyéb fertőzések továbbadásának elkerülése érdekében, a fogászatoknak mindig fertőtleníteniük kell a fogászati lenyomatokat, mielőtt továbbadnák azokat a fogtechnikai laborokba. Ha a fogtechnikai laborok nem biztosak abban, hogy a fogászati lenyomatokat előzetesen már fertőtlenítették, akkor minden esetben biztosítani kell a fogászatoktól érkező anyagok fertőtlenítését!

#### Adagolás és felhasználás:

Öblítse le a lenyomatokat folyó víz alatt. Oldjon fel 2 liter vízben a mérőkanál 2.mérés szintjéig adagolt granulátumot (= 2 % munkaoldat). Helyezze a lenyomatot a munkaoldatba, hagyja hatni a teljes behatási ideig, majd öblítse le a darabokat ismételt folyó víz alatt.

### Mikrobiológiai hatékonyság

Hatékonyság	Koncentráció	Behatási idő
<b>baktericid</b> EN 13727, EN 14561 - tiszta körülmények	2 % (20 g/l)	15 perc
<b>yeasticid</b> EN 13624, EN 14562 - tiszta körülmények		
<b>virucid burkos vírusok ellen</b> EN14476 - tiszta körülmények		
<b>virucid</b> EN 14476 - tiszta körülmények		

CE 0297



## Termék adatok

Összetétel:

100g granulátum hatóanyag tartalma: 45g kálium-peroximonoszulfát-bisz(szulfát).

Címkézés EU 648/2004 sz. rendelete szerint: 5-15% anionos felületaktív anyagok, <5% nem-ionos felületaktív anyagok, <5% szappan, <5% poszfonátok, illatanyagok

### Kémiai-fizikai adatok

Szín	fehér
Lobbanáspont	nem alkalmazható
Formula	granulátum
pH	ca. 4 / 5 g/l / 20 °C / vízben
Viszkózitás, dinamika	nem alkalmazható

## Speciális ajánlás

**Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termék információkat!**

A fogászati lenyomatok dentavon® használatával végzett fertőtlenítése során különös figyelmet kell fordítani az áztató kádban az előírt alkalmazási koncentráció és behatási idő betartására. Ne nyelje le! Kerülje a szembe vagy bőrre jutást! Amennyiben ez mégis megtörténik, az érintett testrészt sok vízzel öblítse! Kesztyű használata ajánlott a termék alkalmazása során. A munkaoldat érzékeny textílián fehéritő hatású lehet. A tároló edényzetet tartsa szorosan lezárva! Óvja fagytól, hőtől és napfénytől! Szobahőmérsékleten tárolja az eredeti tároló edényzetben!

Kizárólag a teljesen kiürített csomagolóanyagot lehet újrahasznosítani. A maradék terméket háztartási hulladékként lehet kezelni. A használat helyén megfelelő szellőzést kell biztosítani. Kizárólag professzionális felhasználásra. Nem alkalmas szemkritikus és kritikus orvostechikai eszközök végső fertőtlenítésére.

## Rendelési információ

Termék	Rendelési egység	Cikkszám
dentavon® doboz (900 g)	4/karton	125203

## Kapcsolódó termékek

műszer- és eszközfertőtlenítő kádak: 3 L, 5 L, 10 L, 30 L

## Környezetvédelmi információk

Schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően állítja elő.

## További információ

Kérjük, látogassa meg weboldalunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

### Allegro Kft

1045 Budapest, Berliini utca 47-49.

[www.allegro.hu](http://www.allegro.hu)

### Vevőszolgálat:

tel.: +36 1 350 2207

e-mail: [info@allegro.hu](mailto:info@allegro.hu)



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.



Schülke Headquarters  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40-52100-0  
Fax +49 40-52100-318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



1045 Budapest,  
Berliini utca 47-49.  
tel.: +36 1 350 2107  
fax: +36 1 329 1854  
e-mail: [info@allegro.hu](mailto:info@allegro.hu)  
[www.allegro.hu](http://www.allegro.hu)